


취급설명서

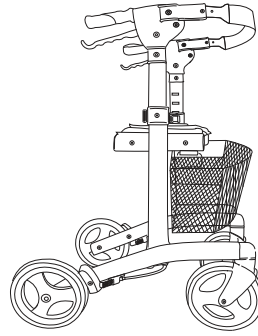

RA60

사용시 주의사항


- 1) 의사 또는 전문가 등 자격을 갖춘 분들의 조언을 받아서 사용자에게 적당한 보행기인 것을 확인한 후 사용하여 주십시오.
- 2) 보행기를 사용하기에 적당한 위치를 위해 걸을 때 항상 후방 바퀴안쪽으로 발걸음 한쪽이 자연스럽게 오도록 조정합니다.
- 3) 보행기는 개인 용도로만 사용할 수 있습니다.
- 4) 보행기는 실내 및 실외 사용을 위해 설계되었습니다.
- 5) 정기적으로 브레이크의 작동 상태를 확인합니다. 브레이크를 당겨 브레이크 기능이 작동하는 것을 확인합니다. 브레이크를 밑으로 눌러 브레이크가 정상적으로 잠기며, 당겨 올리면 잠김이 해제되는 것을 확인합니다.
(2페이지 브레이크 사용법을 참고)
- 6) 휠체어 등과 같이 이송용 의자로 사용하지 마십시오.
- 7) 보행기는 완전히 오픈되어 또한 고정된 상태에서 사용해야 합니다.
- 8) 보행기를 사용하는 동안 적절한 신발을 착용해야 합니다.
- 9) "퍼기 / 접기"의 설명서에 따라서 퍼기/ 접기를 하여 주십시오.
(2 페이지 퍼기 접기를 참조)
- 10) 보행기에 앉아서 발로 밀거나 하지 마십시오.
- 11) 좌석에 올라가거나 하지 마십시오.
- 12) 좌석에 앉기 전에 보행기가 완전히 열려져 브레이크는 잠김 상태에 있는 것을 확인 후 앉아 주십시오.
- 13) 보행기는 계단이나 에스컬레이터를 사용하지 마십시오.
- 14) 지면이 경사지거나 고르지 못한 상태에서는 보행기에 앉지 마십시오.
- 15) 도로 표면이 경사진 곳을 이동 시에는 주의하여 이동하여 주십시오.
- 16) 보행기의 등받이에 완전히 기대어 사용하지 마십시오.
- 17) 보행기가 고장 등으로 제대로 작동하지 않는 경우에는 사용하지 마십시오.
- 18) 최대 사용자 무게는 113kg입니다.
- 19) 보행기를 보관하거나 이동시 보행기 위에 짐을 올리지 마십시오.
(보행기가 손상될 수 있습니다.)

조립방법

주의!


보행기를 사용하기 전에 모든 볼트가 안전하게 고정되어 있는지 확인!
보행기에 앉기 전에 브레이크는 주차 / 고정 위치에 있어야 합니다!

1. 브레이크 핸들의 설치

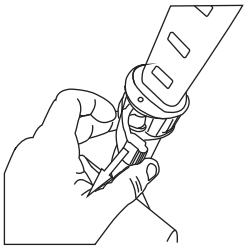


보행기는 열린 상태에서 빨강 릴리스레버를 열고 브레이크 핸들을 축에 삽입합니다.
이때 브레이크 축의 중심의 금속 부품이 프레임축 중앙 홀에 들어가도록 조정해서 삽입합니다. 삽입 후 높이조절위치에서 빨강 릴리스레버가 작동해야 브레이크가 정상 작동 합니다.

2. 등받이의 설치

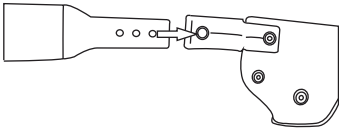


등받이 양쪽 끝을 등받이 고정부에 삽입하여 고정 합니다.
등받이의 쿠션 축이 안쪽으로 오도록 합니다.

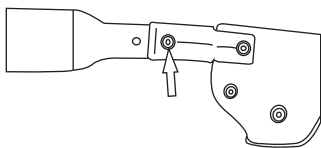

스크류 너트를 사용하여 확실히 고정합니다.

3. 바구니의 설치

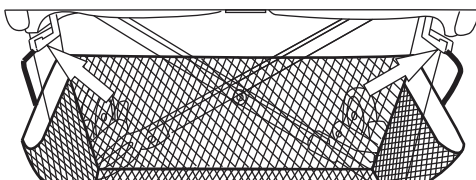


시트 아래에 있는 빨강 걸이에 바구니 후크를 걸어서 설치합니다.
주의 : 바구니 허용하중 5kg 초과한 물건은 넣지 마십시오.

제품라벨


1. 제품명
2. 특허
3. CE 마크
4. 취급설명서를 읽을 것
5. 손잡이 높이
6. 최대 폭
7. 실내 실외 사용
8. 최대사용자의 무게 / 바구니 허용하중
9. 수입원
10. 제조일자
11. 제조국

1	RA60
2	DESIGN PATENT
3	CE
4	i
5	72-92CM
6	62CM
7	Max user weight : 113kg/250lbs
8	Basket load : 5kg/11lbs
9	수입원 : (주)클리어뷰 볼스케어 경기도 화성시 마도면 금당리 191-4 Tel. 031)312-3791
10	2012. 10
11	Made in Malaysia


브레이크 사용방법

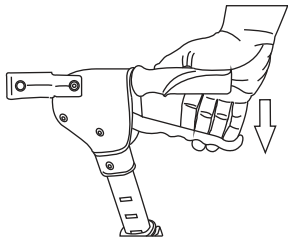

주차브레이크는 보행기를 세워
앉거나 할때 계속해서 정지된
상태를 유지 합니다. 브레이크를
가볍게 밑으로 내리면 주차브레이크
상태를 유지 합니다

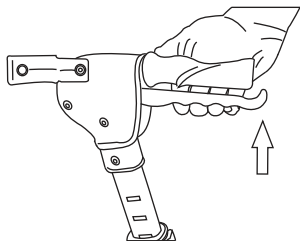


속도를 줄이기 위해 또는
주차브레이크를 해제하기 위해
브레이크 핸들을 잡니다.

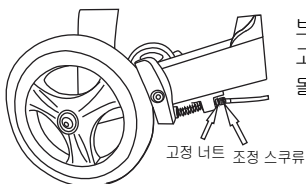

브레이크 장력을 조절하기 위해
고정너트를 풀고 조정 스크류를 좌우로
돌려서 조절합니다.


고정 너트 조정 스크류

펴기 / 접기

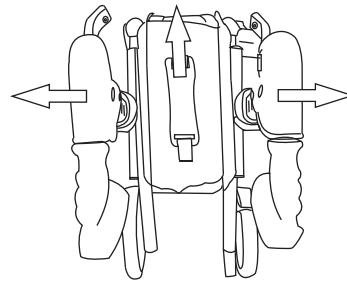

접 기
↑
빨강 핸들 스트랩을
위로 올려 접습니다.

펴 기
← →
롤레이터를 전개 할 수 있습니다.
핸들을 당겨 떨어져 있으며,
좌석에서 아래로 밀어 장소에
고정합니다.

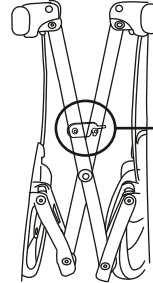

락레바
락레바를 걸어 안전하게 롤레이터를
보관할 수 있습니다.

사 용 법




앉으시면서 과도한 힘을 핸들부에 가하지 마십시오.
핸들은 앉기 위해 회전 시 균형을 잡기 위해 사용하여 주십시오.
핸들을 손으로 잡고 천천히 체중을 시트에 옮겨 주십시오.

보관 및 이동

1. 사용 후 보관시 바구니를 빼내고 운반에 편리하도록 보행기를 접습니다.
2. 보행기를 보관시 본체에 손상을 방지하기 위해 다른 물건을 보행기 위에 올리지 마십시오.

수 리

1. 미지근한 세제를 사용하여 세정 후 마른 수건으로 습기를 제거하여 주십시오.
2. 바퀴를 깨끗이 닦아 주십시오.
3. 나사가 확실히 고정되어 있고 핸들 조정 고정부가 확실히 고정되어 있는지 확인합니다.
4. 보행기가 정확히 작동하지 않을 시에는 판매점에 연락하여 주십시오.
5. 보행기가 정상적으로 작동하지 않을 시에는 사용을 중단하여 주십시오.
6. 교환용 부품은 승인된 부품 및 악세사리만을 사용하여 주십시오.

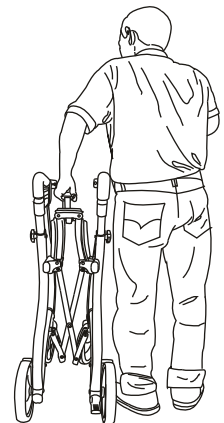

보 증

1. 본제품은 구매일로부터 1년간 제작결함에 대해 보증합니다.
2. 핸드그립(손잡이) 등의 마모,브레이크 케이블 및 바퀴는 무상수리에서 제외 부품입니다.
3. 사용자의 취급부주의로 발생한 고장, 부적절한 설치 및 변경, 손상시켰을 때는 책임이 없으며 애프터 서비스에 관한 비용은 판매사에 의해 결정됩니다.
4. 제품 하자 발견 시 구입처 또는 본사로 전화 및 방문하십시오.



Providing an Ounce of Prevention

Clearview Healthcare Products, Inc.

수입원 : (주)클리어뷰 헬스케어

주 소 : 경기도 화성시 마도면 금당리 191-4

Tel. : 031)312-3791

FAX : 031)312-3287

Email : clearview@bedsorefree.com

Website : www.bedsorefree.com

