

사용 후 보관 및 관리방법

- 회전, 구동, 착탈 부위에 이물질이 끼면 작동이 원활하지 않으니 수시로 제거해 주십시오.
- 제품 관리 시 신나, 벤젠, 강한 세척제(휴발성 물질)로 사용하지 마시고 부드러운 천을 이용하십시오.(변색, 변형의 원인이 될 수 있음)
- 직사광선이나 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.(변색, 변형 우려)
- 수시로 바퀴, 브레이크등을 보수, 점검하며 필요에 따라 교환하여 주십시오.
- 제품의 고장 시 임의로 수리하지 마시고, 판매점 또는 수입원에 의뢰한 후 수리 및 교정 검사 후 사용하십시오.

품질 보증서

- 제품명 : 성인용 보행기
- 모델명 : SV-1000
- 자율안전확인신고필증번호 : B191R021-2002
- 구입일자 : 20 년 월 일
- 고객성명 :
- 구입처 :
- 전화번호 :

- 아래와 같이 보증합니다.

보증기간은 제품 구입 후 1년이며 차체 결함시 무상으로 A/S를 받으실 수 있습니다.

* 단, 아래 사항은 무상 A/S에서 제외됩니다.

- 각부분의 노화로 인한 고장, 파손시 (바퀴, 손잡이 등 소모품)
- 제품의 오용, 자연재해, 임의로 개조, 변경하여 발생하는 고장.

* 제품 문의 및 A/S 신청

- 소비자 상담실 : 031) 312-3791/3
- 상담시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 5시(토요일 휴무)

 to your health
Clearview Healthcare Products, Inc.

제조국 : 중국
 제조원 : Aikin Healthcare Co., Ltd
 수입원 : (주)클리어뷰헬스케어
 주 소 : 경기도 화성시 마도면 금당리 191-4
 전 화 : 031)312-3791(대) 팩스 : 031)312-3287
 E-mail : clearview@bedsorefree.com
 website : www.bedsorefree.com

 to your health
Clearview Healthcare



취급설명서

성인용 보행기 SV-1000



목 차

제품사양, 기능용도 ----- 2P	사용상 주의사항 ----- 5P
각부의 명칭, 세부사진 ----- 3P	제품 사용법 ----- 6P,7P
안전상 주의사항 ----- 4P	제품보증서 ----- 8P

성인용 보행기 SV-1000을 구입해 주셔서 감사 드립니다.

이 사용설명서를 읽어보신 후 올바르게 사용하시기 바랍니다.

특히 『안전을 위한 주의사항』(P4)은 사용 전에 반드시 읽어보시고 안전하게 사용하여 주십시오.

제품 사양

품 명	SV-1000 (일체식)
색 상	검 정, 알루미늄
규 격	W430 × L580 × H830mm
재 질	스테인레스, 알루미늄, 합성수지
제품중량	5.5kg
수납 바구니	W400 × L250 × H130mm
수납백 적재무게	5kg
허용하중	80kg
적정신장	150~180cm

기능 및 용도

- ◆ 정상적인 보행에 지장이 있는 노약자의 보행을 돕기 위한 제품으로 실내 및 실외에서 사용 가능한 제품입니다.
- 1. 좌석 시트가 부착된 보행보조차로서 실내 및 실외에서 사용이 가능합니다.
- 2. 손잡이에 브레이크가 부착되어 보행 및 주차 시 안전하고 손쉽게 사용이 가능합니다.
- 3. 8인치 큰바퀴 사용으로 안전하며 방향조절버튼으로 조절하여 방향전환이 자유롭습니다.
- 4. 한번의 조작으로 손쉽게 접을 수 있어서 고령자의 모든 분들이 보관 및 운반이 용이합니다.

각부의 명칭



세부 사진



손잡이



높낮이조절 버튼



팔걸이



바퀴



브레이크 고정레버



접고 펴기 버튼



수납 바구니



방향조절버튼

안전상의 주의

⚠ 경고

잘못된 방법으로 사용하면 중대한 사고로 이어질 우려가 있어 아래의 항목을 반드시 지켜 주십시오.

- 1) 좌면위에 서거나 다리를 걸치거나 뛰어 올라가지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 2) 보행 보조차에 두명 이상 동시에 앉지 마십시오.
(넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 3) 높이가 조정 시에는 조정 파이프의 고정 레버를 확실하게 고정시켜 주십시오.
(손잡이가 흔들려 다칠 위험이 있습니다.)
- 4) 바닥면에 계단 등 단차가 있거나 경사가 심한 곳, 미끄러운 곳에서는 사용하지 마십시오.
(불안정한 장소에서 사용하면 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 5) 흔들지 마십시오.
(본체가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 6) 체중 80kg이 초과되는 분은 사용하지 마십시오.
(본체가 파손되어 다칠 수 있습니다.)
- 7) 반드시 평평하고 안정된 장소에 놓고 사용해 주십시오.
- 8) 보행 보조차 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.
- 9) 등받이를 지탱해서 일어서지 마십시오.
(넘어져서 부상을 당하는 원인이 됩니다.)
- 10) 어린이가 혼자서 사용하지 않도록 하십시오.
- 11) 사용전에 각 부분 사전 점검을 한 후에 정상 작동이 되는지 확인 후 사용하십시오.
- 12) 제품을 던지거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 가하지 마십시오.

- ◆ 본 제품을 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 사용설명서를 반드시 읽고 미리 숙지 하신 후 제품을 사용하여 주시기 바라며 사고방지를 위해서 사용법을 꼭 지켜주십시오.

사용 상 주의 사항

- ◆ 본 제품은 고령자, 환자 또는 장애인 등 정상적인 보행에 지장이 있으신 분들의 보행을 돕기 위한 보행 보조제품입니다.
이 제품 사용시 사용자분 스스로가 외출하실 때 보행차 손잡이에 기대어 차체만이 앞으로 움직이지 않도록 유의 하시고 제품 본래 목적 이외의 용도로 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
(바닥면에 계단 등 단차가 있거나 경사가 심한 곳, 미끄러운 곳에서는 사용하지 마십시오.)
1. 사용 전 사용자의 체형에 맞게 손잡이와 높낮이를 필히 조정 하십시오.
 2. 브레이크 사용시 좌우 양바퀴가 동시에 걸리는지 확인 후 사용하십시오.
 3. 제품에 기대어 차체만이 앞으로 움직이지 않게 주의하십시오.
 4. 이 제품은 주로 고령자가 외출할 때 보행이나 운반 및 휴식에 이용하는 제품으로 자립보행 할 수없는 사람(예 손잡이 등을 붙잡지 않으면 보행 할 수 없는 사람)의 사용에는 적합하지 않으니 주의 하십시오.
 5. 가방안에 유아나, 좌석위에 사람을 실은 채 이동하지 마십시오.
 6. 제품을 펼칠 때 접고 펴기 버튼이 ‘딱’ 소리와 함께 완전히 펼쳐진 상태를 확인한 후 사용하여 주십시오.
 7. 타이어나 브레이크의 마찰이 없는지를 보 수 점검하고 필요 시 교환 하여 사용하십시오.
 8. 사람이 붐비는 장소나 교통이 혼잡한 곳에서 사용 시 주의 하십시오.
 9. 앉은 상태에서 운행을 하지 마십시오
 10. 의자에 앉기 전에 항상 안전을 위해 브레이크 장치를 걸어 두어야 합니다.
 11. 임의로 제품의 분해 및 강한 충격을 가하지 마십시오.

보조차 펴는 방법



1. 손잡이와 좌면 시트를 잡고 제품을 편다.

⚠ 주의

제품을 펼칠 때 '딱' 소리가 날 때까지 완전히 펴야합니다.

보조차 접는 방법



1. 등받이 뒤 좌,우 접고 펴기 버튼을 위로 올려 확실히 해제시킨다
2. 손잡이와 좌면 시트를 양손으로 잡고 접는다.

브레이크 사용법



1. 보행시 손잡이 밑에 있는 브레이크를 위쪽으로 당긴다.
2. 주차시 브레이크를 위로 최대한 당긴 상태에서 왼쪽손잡이에 있는 브레이크 고정레버를 위로 당겨 브레이크와 고정하면 됩니다.
3. 브레이크 해제시에는 반대로 고정레버를 아래로 내려 주시면 브레이크가 풀립니다.

◆ 주의

1. 브레이크는 제품을 주차하거나, 보관할때와 시트에 앉을때 사용하십시오.
2. 브레이크 잠금 상태에서 제품을 밀면 브레이크 고장의 원인이 됩니다.

손잡이 높낮이 조절 방법

조절범위 : 830~930cm



1. 보조차의 사용자가 보조차와 서서 본인의 높낮이 위치를 확인합니다.
2. 좌,우 높낮이 조절 버튼을 누르며 사용자의 높이에 맞게 조절 후, 고정시킵니다.(사용자의 신장을 고려하여 편한 높이로 조절하십시오.)

앞바퀴 방향조절 방법

사진참조

* 방향 전환은 천천히 여유롭게 하십시오.

그림 1.



◆ 직진 방향으로만 주행 시

그림 3.



◆ 360 회전

앞바퀴의 360 회전가능하며 방향의 전환이 용이. 방향조절버튼을 두번 아래로 내린다.

그림 2.



앞바퀴의 주행각도 좌우 45° 각도 이내 사용 시

◆ 앞바퀴 좌우 45° 내에서만 움직이도록 고정 방향고정 장치 1개가 위로 올라가 있음. 버튼을 한번 아래로 내린다.

※ 참고

1. 방향조절버튼의 위치 확인 후 사용하십시오.
2. 주행상황에 따라 앞바퀴의 방향조절버튼을 조절하여 사용하십시오.